


MMG H₂OTM Instrucciones Para Uso – Hombres

1. Lávese las manos con jabón y agua. Limpie el área alrededor de la apertura de la uretra. Algodones antisépticos o toallas pueden ser utilizados.

Nota: Si desea abrir el paquete utilizando las convenientes aperturas, introduzca los pulgares y jale hacia abajo.

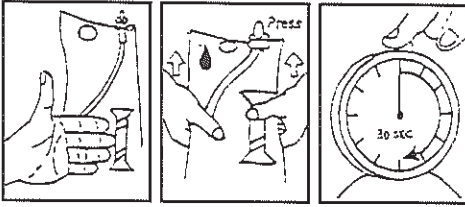

2. Rompa el paquete pequeño con solución salina, recubra la sonda con la solución salina, espere 30 segundos para su activación.
3. Introduzca un dedo por la tapa y retire, de tal manera que quede expuesto el introductor.

Las siguientes instrucciones son para personas diestras. Si usted es zurdo, intercambie el orden de las manos.

4. Utilizando su mano izquierda, introduzca el pulgar dentro de la apertura de la bolsa. Luego utilice el pulgar y el índice para sujetar la guía de la sonda (ver ilustración).



5. Utilizando su mano derecha, adelante la sonda dentro del introductor. Tenga cuidado de no pasar la sonda mas allá del introductor.



6. La sonda debe encontrarse dentro del introductor para darle firmeza. Lubricante adicional para el introductor se encuentra en la tapa.




7. Sujete el pene con la mano derecha y coloque el introductor dentro de la uretra sujetándolo con el pulgar e índice de la mano izquierda.



8. Con el introductor dentro de la uretra, utilice los demás dedos de la mano izquierda para sujetar el pene.

9. Introduzca la sonda en la uretra 1 a 2 pulgadas (2-3 cm.) a la vez utilizando la mano derecha. Cada introducción arrugará un poco la bolsa. Después de cada una apriete la guía de la sonda que sigue sujeta con los dedos pulgar e índice de la mano izquierda para sujetar la sonda. Con la mano derecha estire nuevamente la bolsa.

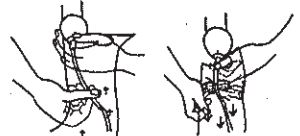

10. Continué avanzando la sonda de esta manera hasta que empiece a fluir orina dentro de la bolsa.

11. Una vez que pare de salir orina, retire la sonda con la bolsa conectada. Rompa la bolsa por la perforacion y desocupe el contenido dentro del baño.

12. Deseche la bolsa, sonda y demás implementos dentro de la bolsa de basura incluida con el producto.



13. Lávese las manos.

El proceso puede llevarle varios intentos para volverse un experto, pero le sorprenderá lo fácil que se vuelve. Si sufre de alguna incomodidad consulte con su medico.

Si tiene algún problema por favor llame a nuestra línea de ayuda al 1-800-334-4475. Estamos ansiosos de poder ayudarlo.

Fabricado para y Distribuido por:
Teleflex Medical
Research Triangle Park, NC 27709 USA
(919) 544-8000
(866) 246-6990

RÜSCH

Hecho en Malasia

DF8025